


НОВИНКА: РЕАГЕНТ ДЛЯ ПОДСЧЁТА СПЕРМАТОЗОИДОВ

Vitalitas «АБРИС+»

Раствор эозин-нигрозина для подсчёта процентного содержания живых сперматозоидов

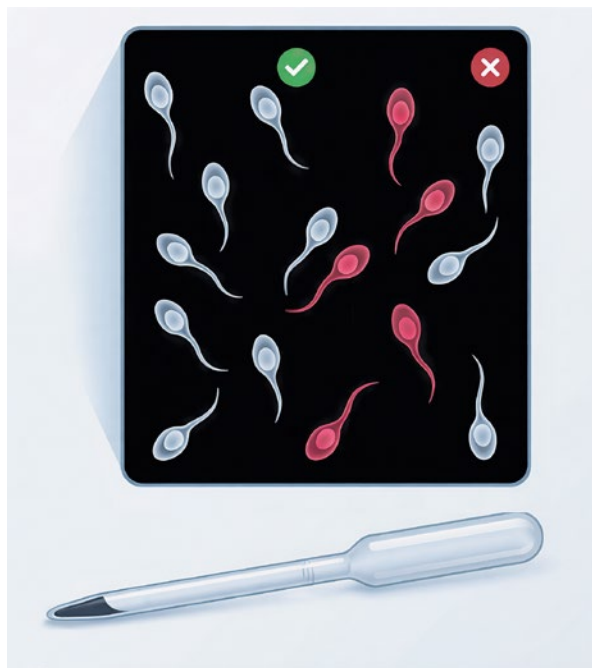

Быстрый и простой метод окрашивания:

- Добавьте раствор в пробирку с эякулятом в соотношении 1:1, осторожно перемешайте.
- Через 30 секунд поместите каплю на предметное стекло, накройте покровным стеклом – препарат готов!
- Живые не окрашены (белые), мертвые полностью или частично окрашены в розовый цвет.

Формы выпуска наборов:

Кат. №	506.Э.1	506.Э.2
Количество определений	300	600
Объём флакона, мл	15	15
Количество флаконов, шт	1	2

Срок годности: 24 месяца




НОВИНКА: РЕАГЕНТ ДЛЯ ПОДСЧЁТА СПЕРМАТОЗОИДОВ

Фиксатор-разбавитель «АБРИС+»

*Реагент для фиксации
и разбавления спермы*

**Простой способ обездвижить сперматозоиды
при подсчете их концентрации
в камере Горяева.**

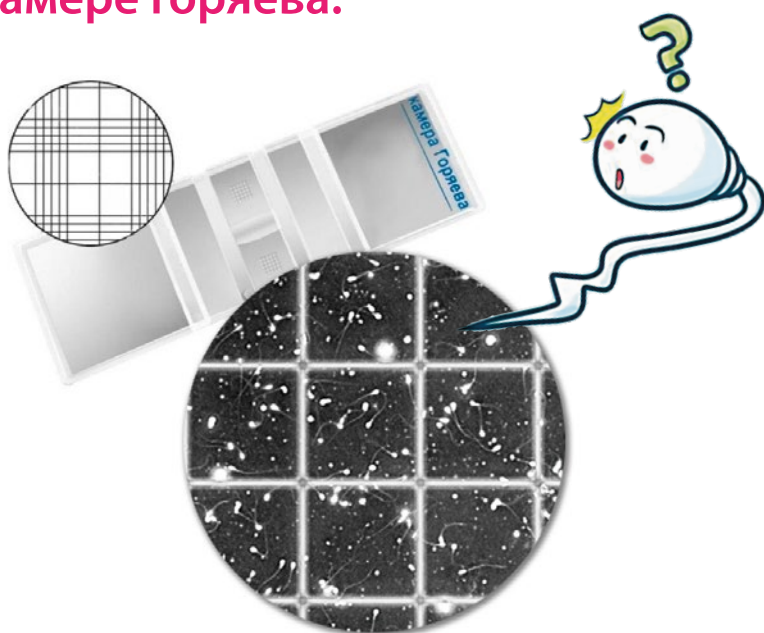

Процедура подсчёта:

- выберите разведение, оценив нативный препарат;
- разбавьте эякулят в пробирке с помощью «Фиксатора-разбавителя «АБРИС+» в нужном соотношении: 1:5, 1:10, 1:20;
- перемешайте;
- заполните камеру Горяева образцом и приступайте к подсчёту.

Формы выпуска реагента:

Кат. №	506.Ф.1	506.Ф.2	506.Ф.3
Количество определений	60	310	625
Объём флакона, мл	100	500	1000
Количество флаконов, шт	1	1	1

Срок годности: 18 месяцев

