

Витал Девелопмент Корпорэйшн BK12-30 NT-proBNP-Имаксиз (IMAXYZ)

СДЕЛАНО
В
РОССИИ

РУ № Г004-00110-00/05472270 от 03.07. 2026г.

N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида

- биомаркер, вырабатываемый клетками сердечной мышцы в ответ на её растяжение при повышении давления или объёма крови в полостях сердца.

Определение уровня **NT-proBNP** является одним из наиболее информативных методов ранней диагностики сердечной недостаточности, острого коронарного синдрома и некоторых форм лёгочной гипертензии.

Повышенные значения этого показателя отражают перегрузку миокарда и степень тяжести сердечной дисфункции. Заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности хроническая сердечная недостаточность, широко распространены: по данным ВОЗ, ими страдает до 2% взрослого населения, а среди людей старше 70 лет - более 10%.

Определение NT-proBNP имеет высокую диагностическую ценность: тест используется для дифференциальной диагностики одышки, оценки прогноза при сердечной недостаточности, мониторинга эффективности терапии и выявления скрытых нарушений функции сердца на ранних стадиях.

Зачем назначается исследование?

Оценка повышенного риска сердечно-сосудистых событий и смертности у пациентов с риском развития СН со стабильной ИБС.

Диагностика больных с подозрением на ХСН.

Стратификация риска пациентов с СН и ОКС.



Когда назначается исследование?

При острой боли, вызванной ишемической болезнью сердца (определение NT-proBNP позволяет оценить степень риска возможных осложнений).

При подозрении на сердечную недостаточность.

При контроле за эффективностью лечения

Что означают результаты?

Повышенный уровень **NT-proBNP**, скорее всего, свидетельствует о сердечной недостаточности. Напротив, результат ниже нормы практически исключает ее наличие.



+7 (812) 250-55-10



sale@vital-spb.ru



www.vital-spb.ru
www.vk.com/vital_spb



г. Санкт-Петербург
Дорога в Каменку, 56 лит. А



Витал Девелопмент Корпорэйшн BK12-30 NT-proBNP-Имаксиз (IMAXYZ)

СДЕЛАНО
В
РОССИИ

РУ № Г004-00110-00/05472270 от 03.07. 2026г.

Референсные значения:

Нормальные значения NT-proBNP зависят от возраста и половой принадлежности пациента. Следует учитывать, что они могут варьироваться при проведении тестов в различных лабораториях ввиду применения разных технологий и методик исследования, а также географических, диетологических особенностей, факторов окружающей среды и сопутствующих заболеваний.



Нормальные значения до:



Причины повышения NT-proBNP

ХСН: Чем выше уровень NT-proBNP, тем выше степень тяжести СН.

Острая повышенная нагрузка на левый желудочек сердца любого происхождения.

Наличие кардиостимулятора.

Что может влиять на результат?

Хроническая почечная недостаточность повышает концентрацию NT-proBNP.

Наличие ревматоидного фактора делает результаты недостоверными.

Концентрация NT-proBNP у женщин выше, чем у мужчин.

Уровень NT-proBNP повышается с возрастом.

Алгоритм использования результата теста NT-proBNP при различных клинических сценариях для исключения СН



Использование NT-proBNP имеет наивысший класс рекомендаций для диагностики и прогноза хронической недостаточности и острой декомпенсации сердечной недостаточности. Включение определения концентрации НУП в стандарты оказания медицинской помощи и доступность исследования позволяет проводить с его помощью дифференциальную диагностику и мониторинг терапии сердечной недостаточности.

Интерпретация результатов определения NT-proBNP требует персонализированного подхода с учетом клинического профиля пациента и различий в клинических сценариях.



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

Полный каталог продукции представлен на сайте: www.vital-spb.ru

V 22.07.2026