



КОНЦЕНТРАТОРЫ КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТОВ

Предназначены для исследования кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты методом формалин-эфирной седиментации согласно МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов».



- Принцип работы основан на диспергировании образца кала, фильтрации крупных частиц с помощью фильтров, разделении полученного фильтрата и концентрировании паразитов в осадке малого объема.
- Полностью закрытый процесс сводит к минимуму контакт лаборанта с калом и исключает контаминацию образца.
- Готовы к использованию и обладают минимальной трудоемкостью среди аналогичных методов.
- Сокращают время проведения анализа до нескольких минут.
- Позволяют проводить исследование со стандартным лабораторным оборудованием (вортекс, центрифуга).
Увеличивают выявляемость возбудителей.

Образцы кала вместе с реактивами, как до, так и после концентрирования, могут храниться в течение недели в холодильнике.

Артикул	Наименование
580050	Набор изделий концентраторы кишечных паразитов

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

